

ネットィ 使用方法


1、ヘッドレスト

ヘッドレストの高さ調整
前後の調整用
ヘッドレストの角度を調整

*調整用のネジは、左に回すと緩み
右へ回すと閉まります。

角度調整

高さ調整

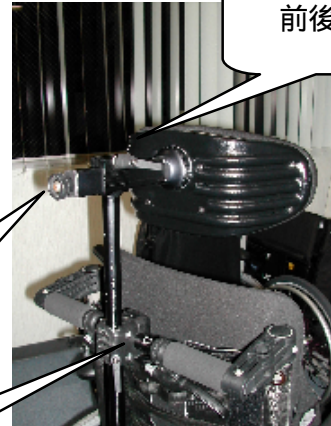

前後調整

2、フットレスト


フットプレートの長さ調整
エレベーター角度調整
フットプレート角度調整

*フットレストを取り外す時
イ) 溝に沿って真直ぐに上へ上げる。
ロ) 外側にまわす。
ハ) もう一度上に上げる。
(はめる時は逆の手順で行って下さい。)

角度調整

長さ調整

フットプレート角度

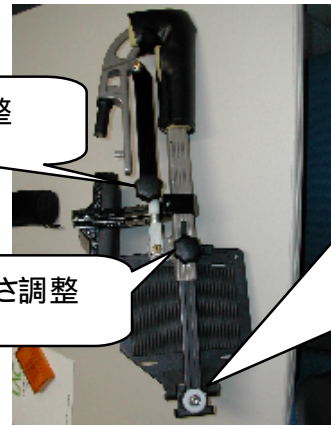


3、アームレスト

アームレスト高さ調整

レバーを外側に向けると高さ調整が可能。
高さを調整した後、レバーが元の位置に
戻っていることを確認して下さい。


高さ調整レバー

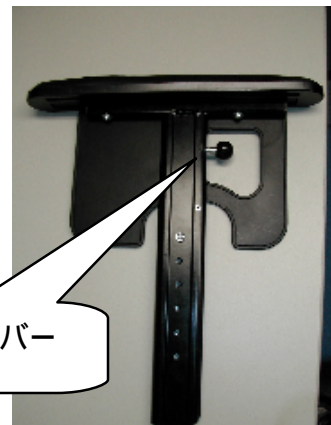

4、 ティルト角度調整

シート部分全体の角度を調整する機能。
左側のレバーを握り、好みの角度で
手を離すと止まります。

ティルトレバー

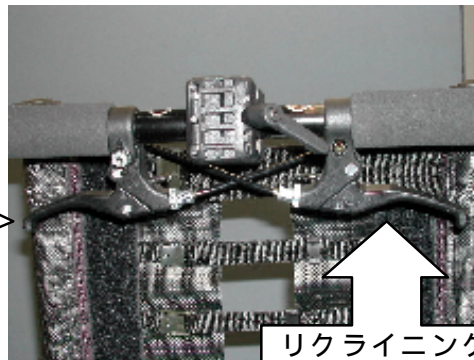

リクライニング
レバー

5、 リクライニング角度調整


バックレストのリクライニング角度を調整します。
右側のレバーを握ると角度の調整ができます。
お好みの角度で手を離して下さい。

矢印の方向に引いて下さい。
ロックが外れると回転します。

6、 転倒防止バー

転倒防止バーは、一度手前に引き内側に 180 度
回転させると上下を入れ替えることができます。
転倒防止バーの長さは調整できます。

この高さが変わります。

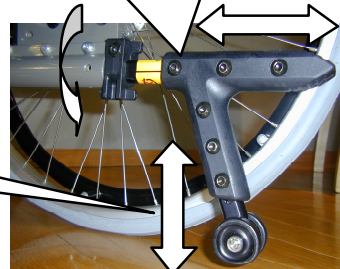

7、 注意事項!!

ティルト・リクライニングを行う時は、必ず転倒防止バーを下に向けて下さい。
ティルト・リクライニングを行うときや、車いすに乗り降りする時は、
必ずブレーキをかけて動かないようにして下さい。
ティルトの角度調整は前にも倒れるようになっています。
角度を操作する時は、急に前に倒れないように手を添えて行って下さい。
車いすの操作はゆっくりと行って下さい。急な操作は利用者が不安になります。