

LAC

食べる機能を引き出す

em リードスプーン  
(エム)

安全に・楽しく・美味しく



em リードスプーン  
(エム)

食べる機能を引き出す



# emリードスプーン

(EM)

快適な『食べる』をサポート。

とらえる・噛んでまとめる・送り込む…  
『食べる』楽しみを導く、  
食事介助専用のスプーンです。

## ポイント 1

スプーンは2mlの容量で、  
1口量が安全に召し上が  
れます。

## ポイント 2

スプーンは抜き取る時の  
上唇を刺激しつつもやさ  
しく拭える深さです。

## ポイント 3

スプーンの凸凹刺激が  
口唇閉鎖を促し、咀嚼  
運動を誘発します。

## ポイント 4

18gという軽さと、把持  
しやすい柄によって、自然  
の重力で舌をとらえます。

## 使い方

### 持ち方



舌の動きを感じられる軽さ  
で持つ

### 置き方



#### 座位の場合

舌のくぼみにスプーンの  
底を押し当てる



#### リクライニングの場合

上唇にスプーンの先端を  
ふれる

### 抜き方



上唇でスプーンの底を  
ぬぐいとる



### 考案者：田中 靖代

ナーシングホーム気の里 施設長

長年、こだわってきた摂食介助によって生み  
出したリードスプーンです。

それは要介助者の食べられない課題を補い、  
口腔機能を引き出すもので、100匙、口へ運  
べば100回のトレーニングができることになり  
ます。

### ■製品仕様

サイズ	製品本体：全長 150mm ヘッド部分 42mm ヘッド横幅 22mm
重量	重量：18g
価格	本体価格：¥680+税/1本 ※1箱12本入

※当カタログ記載の仕様・価格は予告なく変更する場合がございますので  
ご了承ください。

## LAC ラックヘルスケア株式会社

営業本部 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-3-13 CIRCLES平河町3F  
TEL.03-6261-8993 FAX.03-6261-8995  
大阪オフィス 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2-10-2  
TEL.06-6244-0636 FAX.06-6244-0836  
九州オフィス 〒862-0924 熊本県熊本市中央区帯山2-1-23 パークヒル帯山1F  
TEL.096-340-8101 FAX.096-340-8102

製品情報サイト：URL <http://ing-products.com>