


Rizer 1 充電方法

1、車いすの電源を入れて、バッテリーを確認する

充電を開始する前に、車いすの電源を入れてバッテリーの残量を確認してください。

電源ボタンは、車いすの座面の下にあります。

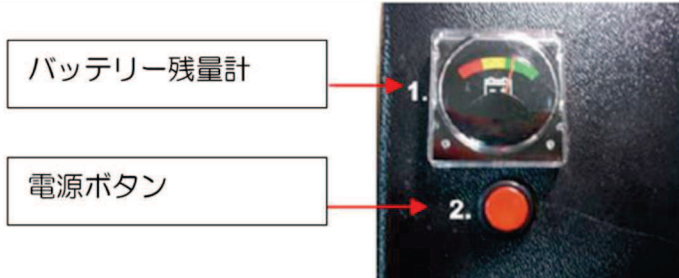

※電源が入っている場合、コントローラーのスイッチを押すと電動スタンディングが作動します。**ON/OFF が分からない場合は、コントローラーで動作確認を**してください。

満タンの場合

残量計の針が一番右にある場合は、充電は不要です



バッテリーが減っている場合

2、以降の手順に従って、充電を行ってください




2、充電器を準備する

充電器をコンセントにつなぎ、充電器のライトが**赤く**点灯することを確認してください。



3、車いすと充電器をつなぐ

充電器のプラグを車いすの接続ソケットに差し込んでください。

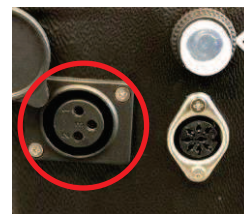

接続ソケット




充電器プラグ

4、充電を開始し、状態を確認する

充電が開始すると充電器のライトが**赤**から**オレンジ**に変わります。


(満充電の場合は、**緑色**が点灯します)

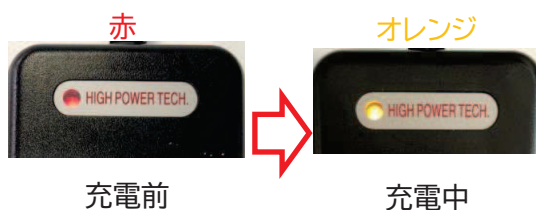

※ライトが**赤**から変わらない場合は、充電器の接続を確認してください。

5、充電完了の確認

充電が完了すると、充電器のライトが**緑色**に変わります。終了後は、車いすから充電器を外してください。

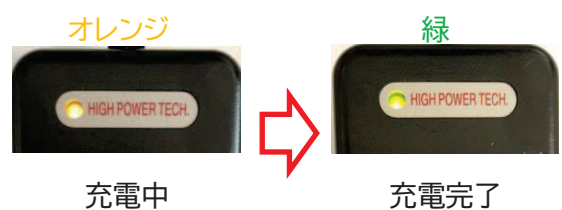

※長期間使用しない場合は、電源を **OFF** にして保管してください。

Rizer 1を安全にご使用いただくために

車いす操作に関する注意事項

本書面に記載の事項は、取扱説明書より抜粋した内容となっています。車いすをご利用の前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

- 車いすをご使用になられる前に、各部分に破損やネジ等のゆるみがないかご確認ください。
- 電動スタンディングを使用する際は、衣服や指などフレームの隙間や可動部分に挟まないようにご注意ください。
- 車いすに乗り移りをする際は、フットサポートに立たないでください。
- 車いすのバックサポート(背もたれ)や介助ハンドルに荷物をかけないでください。
- 車いすの介助ハンドルを持って、車いすを持ち上げないでください。
- スタンディング機能は平らな場所で使用してください。
- 段差や傾斜のある場所(坂道やスロープ)、不安定な場所では使用しないでください。
- 車いすに異常を発見した場合には使用を中止し、取扱店へご連絡ください。

バッテリーの充電に関する諸注意

- 車いすをご使用になる前に、バッテリーの残量が十分に残っている事をご確認ください。
- バッテリーの残量が無くならないように定期的に充電を行ってください。
- バッテリーの残量が著しく低下すると、電動スタンディングが動かない、あるいは、充電ができなくなる場合があります。
- 充電の頻度：
 - ✧ 電動スタンディングを使用した日は、充電を行ってください。
 - ✧ スタンディングを使用しない場合でも、週に1度はバッテリーの残量を確認し、必要に応じて充電してください。
 - ✧ 長期間使用しない場合は、電源を OFF にしてください。電源を OFF にした場合でも、1～2週間に1回はバッテリー残量を確認してください。
- バッテリー残量計の針が黄色の範囲にある場合は、使用後すぐに充電を行ってください。
- バッテリー残量計の針が赤色の範囲にある場合は、電動スタンディングを行わずにすぐに充電してください。
- 充電が完了しましたら、車いすから充電器を外してください。
- 充電を行っている間は、電動スタンディングを使用することはできません。
- 充電の手順は、裏面をご確認ください。